



Fragen Sie Ihren MyPermobil Sprach-Assistenten


- Wie ist der derzeitige Batterieladezustand?
- Wann habe ich zuletzt die Batterie aufgeladen?
- Wie weit ist die geschätzte verbleibende Reichweite?
- Wie weit kann ich mit der aktuellen Batterieladung fahren?
- Wie oft habe ich mich heute schon repositioniert?
- Wie sehen meine Nutzungsdaten aus?
- Wie lautet die Seriennummer meines Elektrorollstuhls?

android & iOS


- 1 Öffnen Sie die Alexa App (muss evtl. vorher heruntergeladen werden). Tippen Sie auf das Menüsymbol und dann auf "Skills & Spiele".
- 2 Klicken Sie auf den Reiter "Ihre Skills" und suchen Sie nach "MyPermobil".
- 3 Klicken Sie auf die "MyPermobil Skills".
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zur Verwendung freigeben".
- 5 Klicken Sie auf "Einstellungen" und wählen Sie "Konto verknüpfen".
- 6 Wählen Sie Ihre Region aus.
- 7 Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres MyPermobil-Kontos ein und klicken Sie auf "Weiter".
- 8 Warten Sie, bis Sie einen Verifizierungs-Code erhalten, fügen Sie den Code in das dafür vorgesehene Textfeld ein und drücken Sie auf "Konto verifizieren".
- 9 Amazon Alexa und die MyPermobil App sind nun verknüpft.

Kurzanleitung zur Einrichtung für die Verknüpfung von MyPermobil mit Google-Geräten

android

- 1 Öffnen Sie die Google Home App  (muss evtl. vorher heruntergeladen werden).
- 2 Klicken Sie oben rechts auf das Symbol für Ihr Konto.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass das angezeigte Google Konto das ist, was mit Ihrem Lautsprecher oder Display verknüpft ist. Um das Konto zu wechseln, tippen Sie auf ein anderes Konto oder "Anderes Konto hinzufügen".
- 4 Klicken Sie auf "Assistant Einstellungen" und dann auf "Geräte". Anschliessend auf „Geräte hinzufügen“ und gleich „Smart Home Geräte verknüpfen“
- 5 Blättern Sie durch die Liste der Apps für den Assistant. Wählen Sie die MyPermobil Karte (Hinweis: Sie müssen die MyPermobil App auf Ihrem mobilen Gerät heruntergeladen haben).
- 6 Klicken Sie auf den blauen "Link"-Text.
- 7 Wählen Sie Ihre Region aus.
- 8 Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres MyPermobil Kontos ein und klicken Sie auf "Weiter".
- 9 Warten Sie, bis Sie einen Verifizierungs-Code per E-Mail erhalten, fügen Sie den Code in das dafür vorgesehene Feld ein und drücken Sie auf "Konto verifizieren".
- 10 Google Home und die MyPermobil App sind nun verknüpft.

iOS

- 1 Öffnen Sie die Google Assistant App (iOS)  (muss evtl. vorher heruntergeladen werden).
- 2 Klicken Sie oben rechts auf das Symbol für Ihr Konto.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass das angezeigte Google Konto das ist, was mit Ihrem Lautsprecher oder Display verknüpft ist. Um das Konto zu wechseln, tippen Sie auf ein anderes Konto oder "Anderes Konto hinzufügen".
- 4 Klicken Sie auf "Assistant Einstellungen" und dann auf "Geräte". Anschliessend auf „Geräte hinzufügen“ und gleich „Smart Home Geräte verknüpfen“
- 5 Blättern Sie durch die Liste der Apps für den Assistant. Wählen Sie die MyPermobil Karte (Hinweis: Sie müssen die MyPermobil App auf Ihrem mobilen Gerät heruntergeladen haben).
- 6 Klicken Sie auf den blauen "Link"-Text.
- 7 Wählen Sie Ihre Region aus.
- 8 Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres MyPermobil Kontos ein und klicken Sie auf "Weiter".
- 9 Warten Sie, bis Sie einen Verifizierungs-Code per E-Mail erhalten, fügen Sie den Code in das dafür vorgesehene Feld ein und drücken Sie auf "Konto verifizieren".
- 10 Google Home und die MyPermobil App sind nun verknüpft.