



Sådan bruger du antigentesten til næsepodning



HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT LAVE EN TEST?

Vi har lavet en hjemmeside kun for dig, som skal tage testen selv. Tjek QR koden her, se en video om, hvordan man tager en test, stil spørgsmål om testen og få fif og gode råd. info.ssidiagnostica.dk/skoletest



Før du bruger testen

Tjek at alt indhold er i æsken. I hver æske skal der være:

A / 20 individuelle foliepakker. Foliepakken er påtrykt "COVID-19 Rapid Test", og hver foliepakke indeholder én testkassette, og én "fugtsamler".

Tjek at holdbarheden er i orden. Se "EXP : xxxx (år) – xx (måned) – xx (dag)".
(Er holdbarheden overskredet, kan testen ikke bruges).

B / Papstativ med plads til 6 prøver.

C / 20 prøvetagningsrør i blødt plastik og 20 hætter, som passer til
– i samme pose.


D / 2 flasker med buffer-væske.

På flasken står der 'COVID-19 Ag Rapid Test Sample Extraction Buffer'.

E / 20 individuelt forseglede podepinde. Selve podepinden ligner en
lang vatpind – med vat i den ene ende.

Der er også en brugsanvisning (*ikke afbilledet*) i æsken.

Den kan benyttes, hvis der er brug for yderligere information om testen.

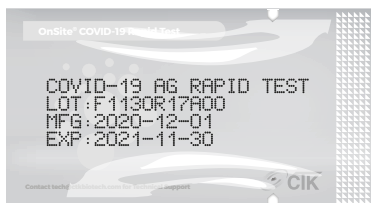

Sådan ser testkassetten ud når den er taget ud af foliepakken.
Tag den ikke ud før den skal bruges!

x 20



x 1



x 1



x 2



x 20

Ting du har brug for, som ikke er med i æsken:

- Serviet/papir til at pudse næsen.
- Et stopur til at tage tid. Du kan fx bruge din telefon.
- En pose til at smide den færdige test ud. Har du ikke en pose, så smid den færdige test og test materialer direkte i skraldespanden.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT LAVE EN TEST?

Vi har lavet en hjemmeside kun for dig, som skal tage testen selv. Tjek QR koden her, se en video om, hvordan man tager en test, stil spørgsmål om testen og få fif og gode råd. info.ssidiagnostica.dk/skoletest



Nu skal du gøre dig klar til at tage prøven fra næsen


- A** Rengør testområdet og stil tingene klar.
Som testområde kan du med fordel benytte et normalt bord.



Start med at pudse næsen, så næseboret er så rent som muligt. Smid papiret ud derefter.




Vask nu dine hænder, eller brug håndsprit, som du sikkert kender, inden du starter.

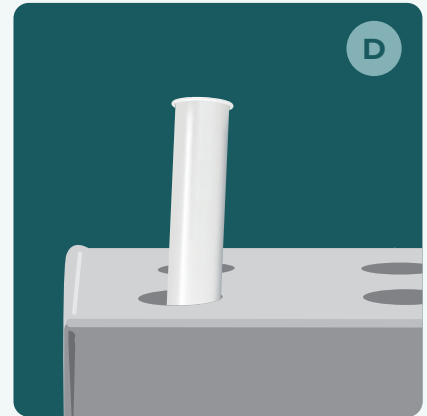

Gør papstativet klart.

Tag et prøvetagningsrør fra posen med prøvetagningsrør og hætter, og sæt et prøvetagningsrør i papstativet som vist på billedet.


Step 1: Sådan gør du prøvetagningsrøret klart

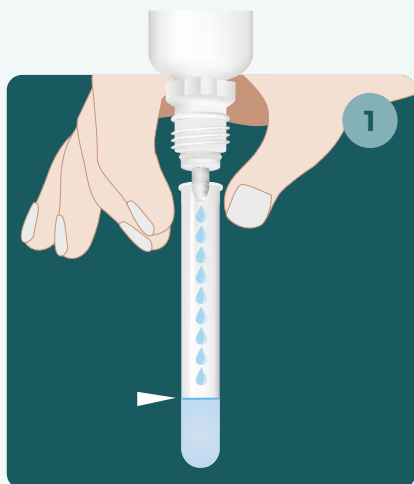

Løft prøvetagningsrøret op fra papstativet.

Læg mærke til den markerede linje i bunden af prøvetagningsrøret.

Fyld nu 9-10 dråber buffer-væske i prøvetagningsrøret, indtil væsken når den markerede linje.

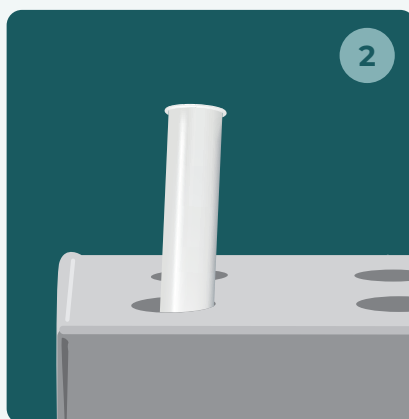

Sæt derefter røret tilbage i papstativet hvor du tog det fra.


Du skal bruge det senere.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT LAVE EN TEST?

Vi har lavet en hjemmeside kun for dig, som skal tage testen selv. Tjek QR koden her, se en video om, hvordan man tager en test, stil spørgsmål om testen og få fif og gode råd. info.ssidiagnostica.dk/skoletest



Step 2: Sådan bruger du podepinden til at lave en næsepodning

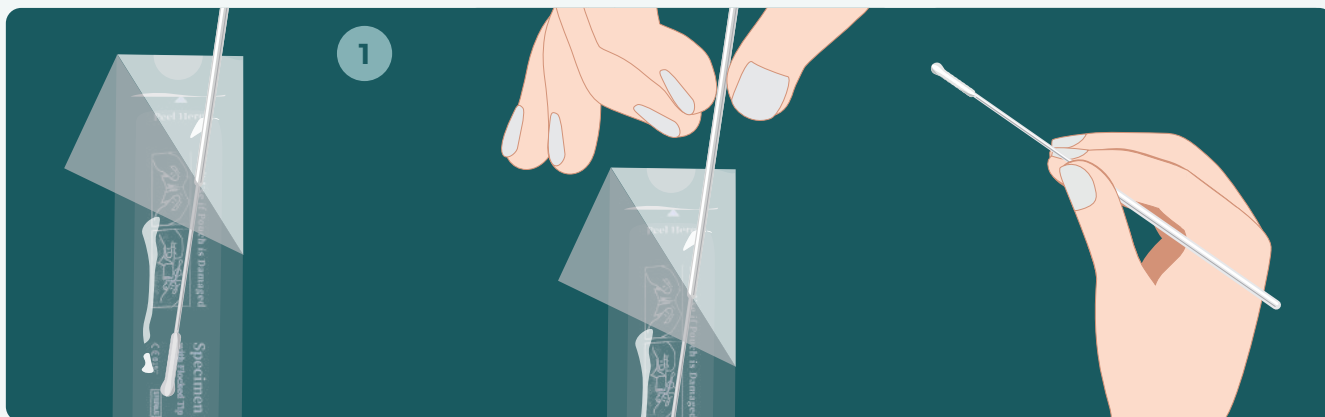

Tag en podepind og åben forseglingen.
Vær opmærksom på at åbne i den ende, hvor der ikke er vat.

Træk forsigtigt podepinden ud.


Gem emballagen, da du kan bruge den, når du har brugt podepinden.

Hold derefter podepinden, på selve plastikdelen, uden at røre vatdelen.
Som vist på billedet her.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT LAVE EN TEST?


Vi har lavet en hjemmeside kun for dig, som skal tage testen selv. Tjek QR koden her, se en video om, hvordan man tager en test, stil spørgsmål om testen og få fif og gode råd. info.ssidiagnostica.dk/skoletest



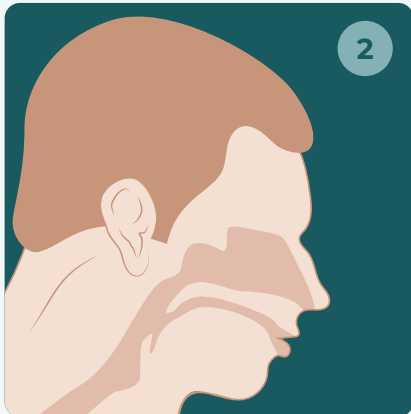

Hold hovedet vandret, og kig lidt nedad.


Hold hovedet i en position som vist på tegningen her.

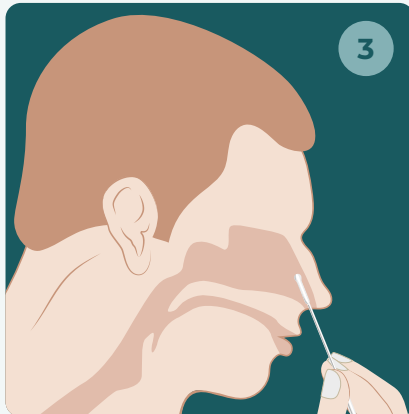

Før nu podepinden roligt op i næseboret med vatdelen først.

Hele vatdelen af podepinden skal være ført op i næsen – så vatdelen er dækket af næseboret.

Når podepinden "møder modstand" i næsen, skal den ikke længere op – max 2-3 cm.

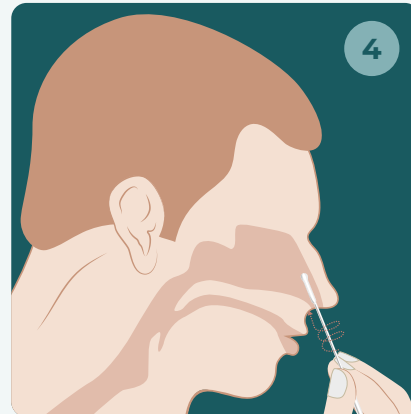

Med cirkelbevægelser, drej nu podepinden rundt ind mod næsevæggen.

Du skal minimum dreje podepinden rundt 5 gange. Det gør man for at sikre at man får mest mulig prøvemateriale fra næsen.




Tag forsigtigt podepinden ud af næseboret, og gentag proceduren i det andet næsebor.

Drej podepinden rundt 5 gange i det andet næsebor.

Brug samme podepind til begge næsebor.


Efter du er færdig med at køre podepinden godt rundt i det andet næsebor, tager du podepinden forsigtigt ud af næsen.

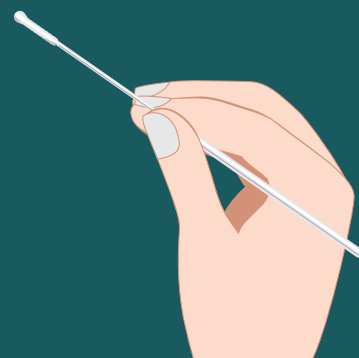


Hold nu podepinden i hånden, uden at den kommer i kontakt med noget. Dette er meget vigtigt!

Podepinden skal nu ned i prøvetagningsrøret for at "blandes".

Step 3: Sådan bruger du den næsepodning du lige har lavet, sammen med prøvetagningsrøret.

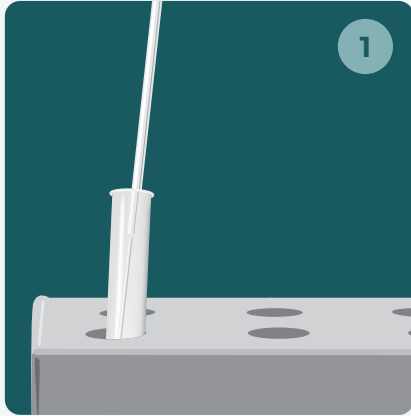


Sæt nu podelinden ned i prøvetagningsrøret som står i papstativet.

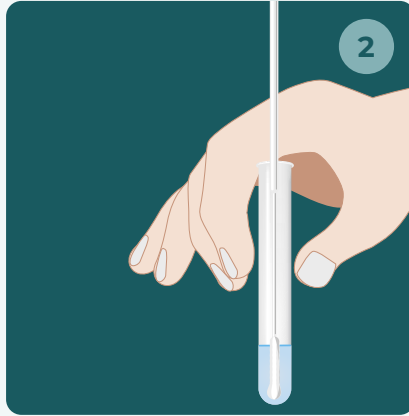

Tag roligt fat om prøvetagningsrøret og løft det op fra papstativet.

Podelinden skal blive i prøvetagningsrøret, mens du gør det.


Hold nu røret mellem fingrene. Fx som vist på billedet.

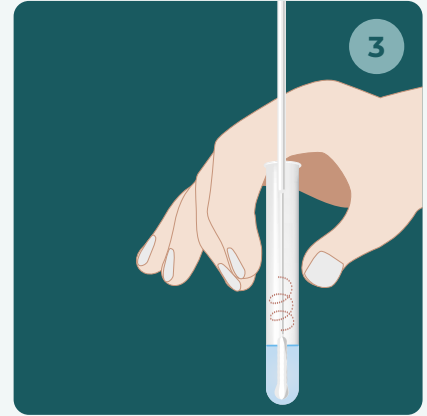

Mens du holder prøvetagningsrøret mellem fingrene, begynder du nu at rotere podelinden rundt i væsken.

Du skal minimum rotere podelinden 5 gange.


Det er vigtigt at vatdelen og væsken bliver blandet grundigt.

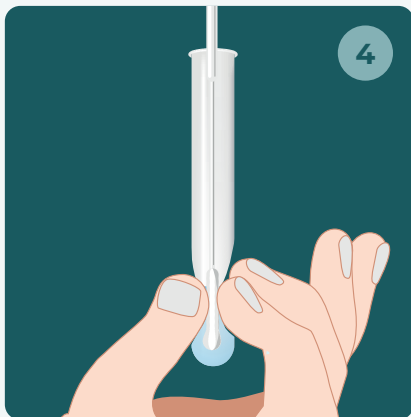

Når du har roteret godt rundt med podelinden i væsken, skal du presse væsken ud af vatdelen på podelinden.


Det gør du ved at presse forsigtigt på vatdelen gennem røret som vist her.

Pres forsigtigt flere gange.

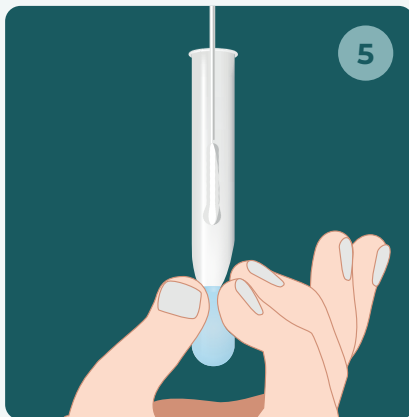


Nu skal podelinden op af prøvetagningsrøret.

Det gør du ved at presse på podelinden gennem røret, **samtidigt med** at du roligt trækker podelinden op.

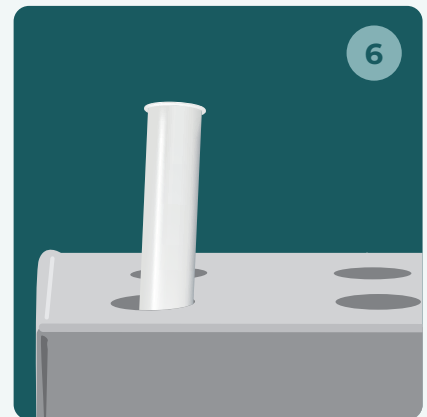


Sæt nu prøvetagningsrøret tilbage i papstativet.

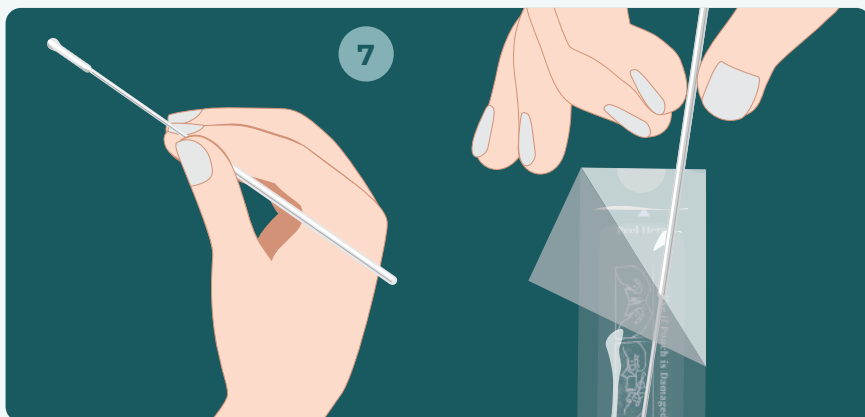

Podepinden som du har taget op skal du ikke bruge mere.

Før nu podepinden tilbage i den originale indpakning, med vatdelen først.

Du kan nu smide podepinden ud, eller gøre det senere. Den skal ikke bruges mere.

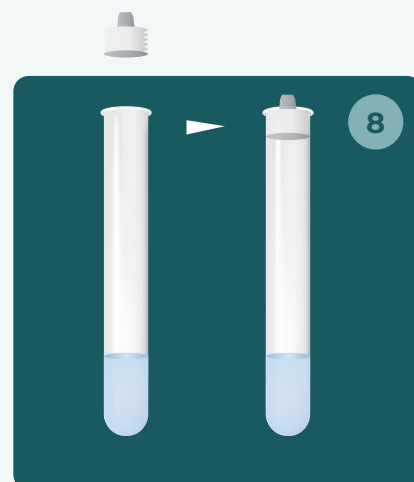

Sæt nu hættten på prøvetagningsrøret.


Sørg for den sidder godt fast.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT LAVE EN TEST?


Vi har lavet en hjemmeside kun for dig, som skal tage testen selv. Tjek QR koden her, se en video om, hvordan man tager en test, stil spørgsmål om testen og få fif og gode råd. info.ssidiagnostica.dk/skoletest



Step 4: Sådan bruger du kassetten til at få et resultat

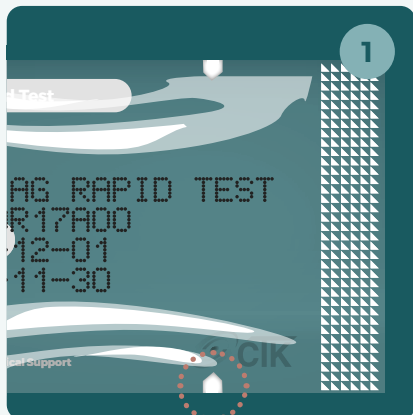


Åben nu foliepakken med kassetten i, og læg kassetten på den rengjorte overflade (oftest et bord). På foliepakken er der markeret hvor du kan åbne.

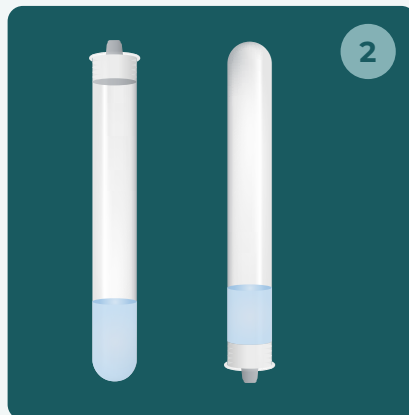

Tag prøvetagningsrøret op af papstativet.

Vend prøvetagningsrøret og hold det lodret.

Nu er du klar til at hælde væske på kassetten.

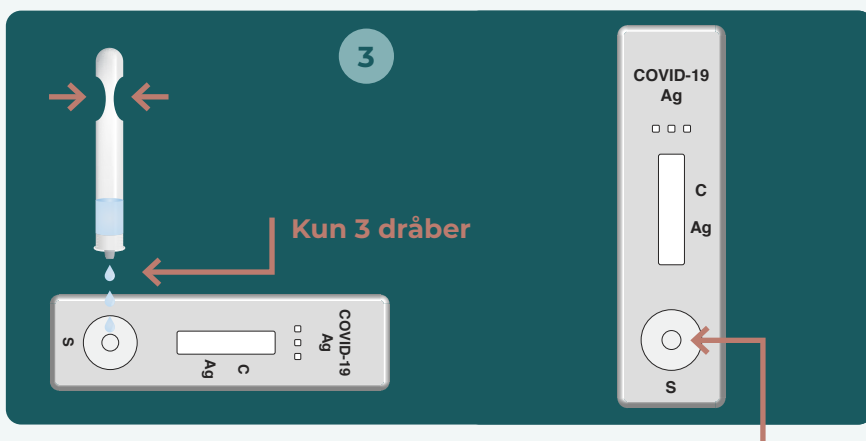

Klem nu forsigtigt på røret, så der kun kommer tre (3) dråber væske ned i kassetten.


De 3 dråber skal ramme "brønden" på kassetten, som findes over bogstavet "S".

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT LAVE EN TEST?

Vi har lavet en hjemmeside kun for dig, som skal tage testen selv. Tjek QR koden her, se en video om, hvordan man tager en test, stil spørgsmål om testen og få fif og gode råd. info.ssidiagnostica.dk/skoletest



Resultatet skal aflæses inden, der er gået 20 minutter

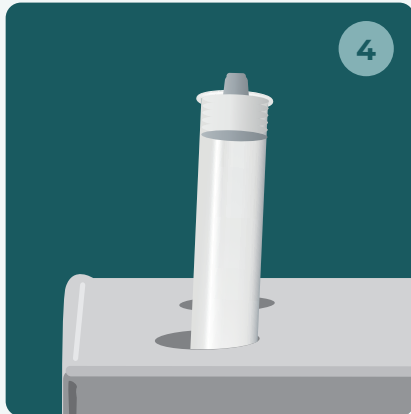


Sæt nu prøvetagningsrøret tilbage i papstativet. Du skal ikke bruge det mere.



Sæt et stopur til 15 minutter, og sæt det i gang. Du kan bruge din smartphone til at tage tid.


Efter 15 minutter kan du aflæse resultatet af testen. Resultatet kan godt være synligt inden 15 minutter.

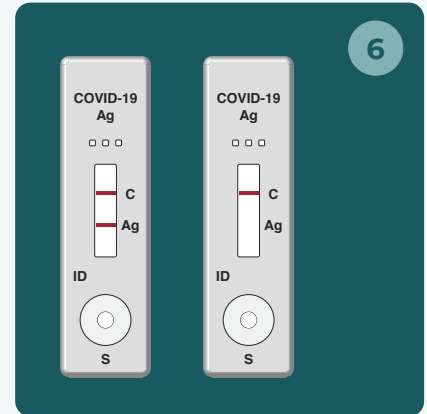

Nu er testen færdig.

Resultatet skal aflæses inden der er gået 20 minutter, så hold øje med kassetten.

På næste side kan du se, hvilke resultater du kan få.

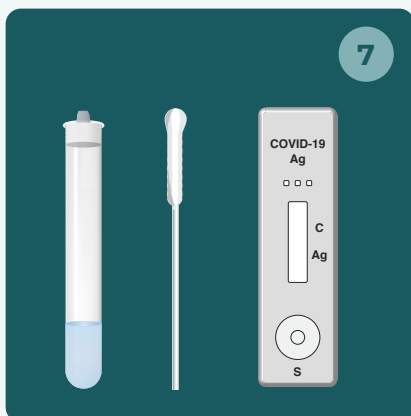

Når du har aflæst resultatet, kan testen smides ud. Smid alt ud du har brugt til testen. Testkassette – prøvetagningsrør og hætte – pipette og emballage til ovenstående.

Vi anbefaler at ovenstående testelemerter samles i en plastikpose, som så kan smides ud.




CTK Biotech, Inc.
13855 Stowe Drive
Poway, CA 92064, USA
Tel: 858-457-8698
Fax: 858-535-1739
E-mail: info@ctkbiotech.com




MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Step 5: Sådan skal du aflæse din test

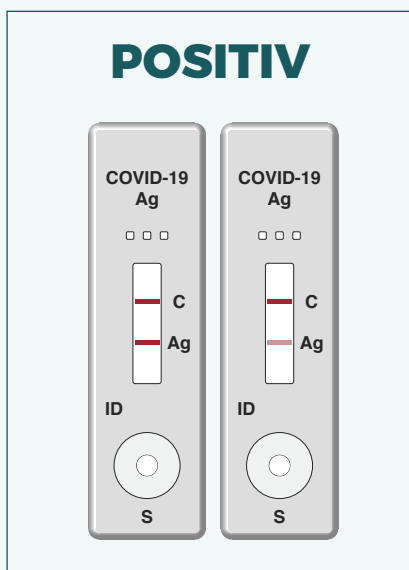


En positiv Antigen test vil vise to streger på kassetten. 1 udfor "C", som viser at testen virker, og 1 streg udfor "Ag" (kort for Antigen), som viser at testen er positiv.

Læg mærke til at strengen udfor "Ag" kan være meget svag. Men kan du, eller en anden, se strengen, så skal prøven betragtes som positiv.

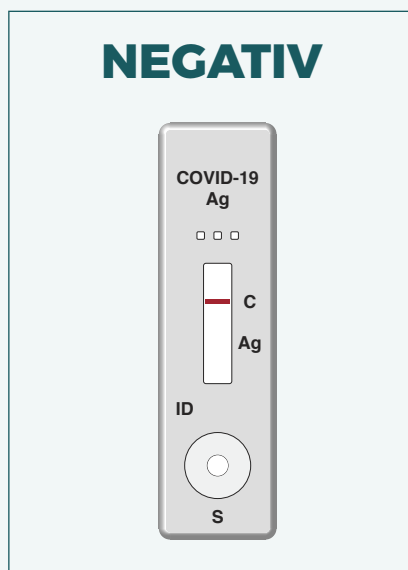

En negativ Antigen test, har kun en streg udfor "C" ("kontrol streg"). Strengen viser at testen virker, og resultatet er negativt.

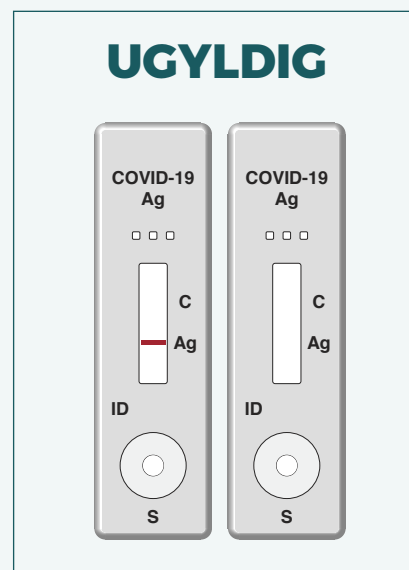

Et testresultat kan også være "ugyldigt". Et ugyldigt resultat viser sig ved, at der enten ikke er nogen streger på testen, eller kun en streg udfor "Ag".

En ugyldig test, kan skyldes at testen ikke er foretaget korrekt, eller der er en fejl i selve produktet.

Tag en test mere for at se om den virker. Virker test 2 ikke, så kontakt SSI Diagnostica.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT LAVE EN TEST?

Skan koden her og se en kort video om, hvordan testen skal foretages.

Her kan du også stille spørgsmål til testen, og se de oftest stillede spørgsmål og svar.

Du kan også ringe på 48 29 91 00, hvis du har brug for hjælp.

Eller sende en mail til info@ssidiagnostica.com

Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

